

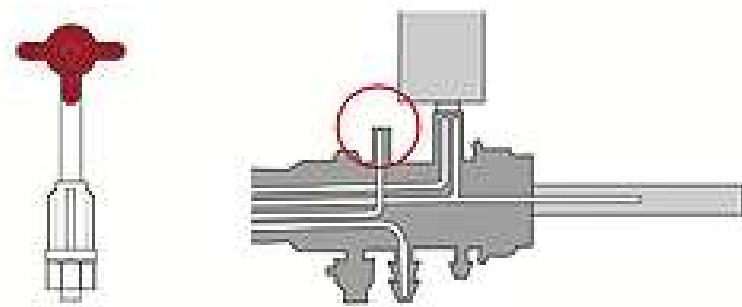


Son fonctionnement


Set de prélèvement

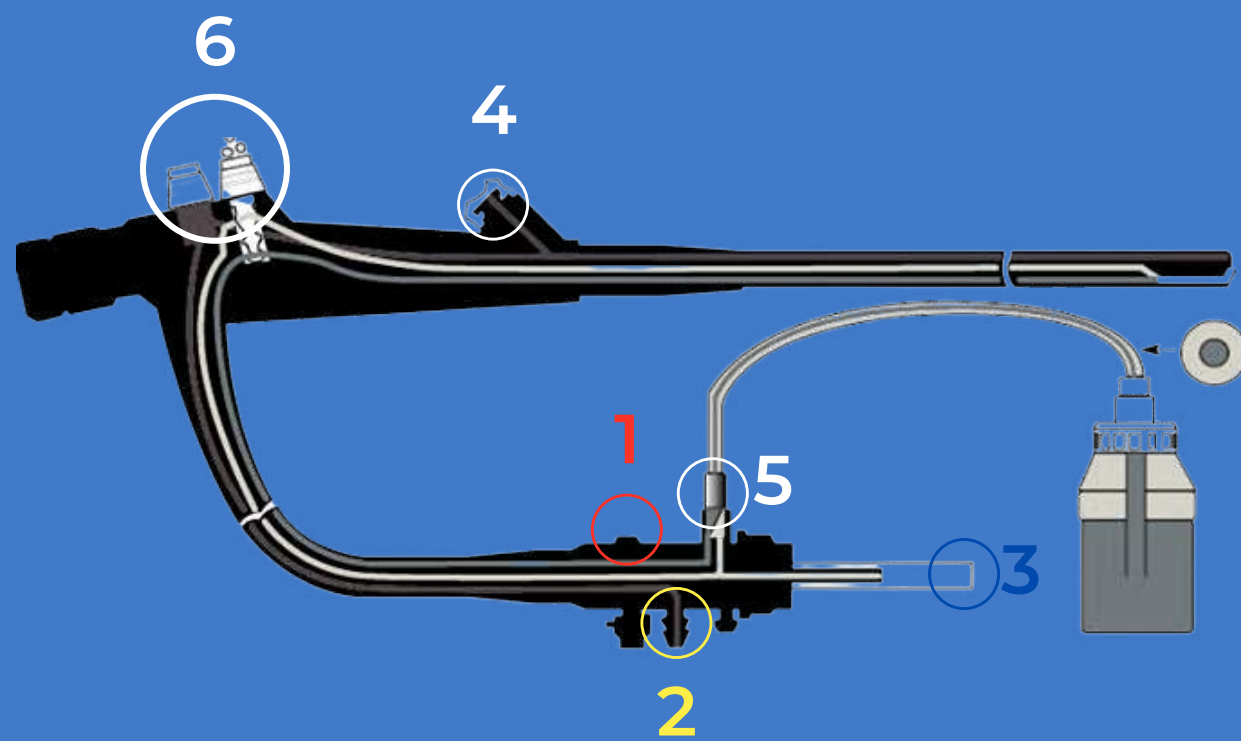


Connectez le port 1 à la partie 1 de l'endoscope

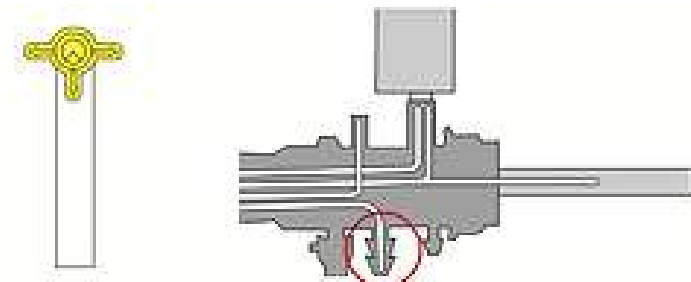


Connectez le port 2 à la partie 2 de l'endoscope

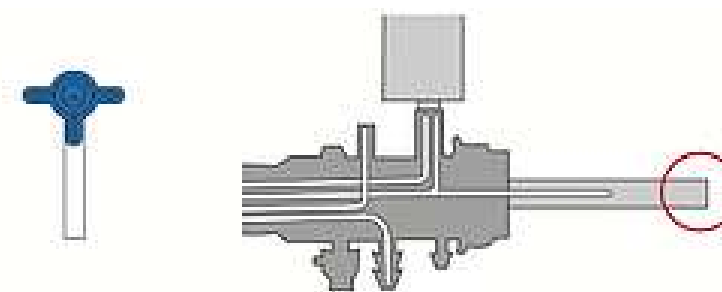


Connectez le port 3 à la partie 3 de l'endoscope

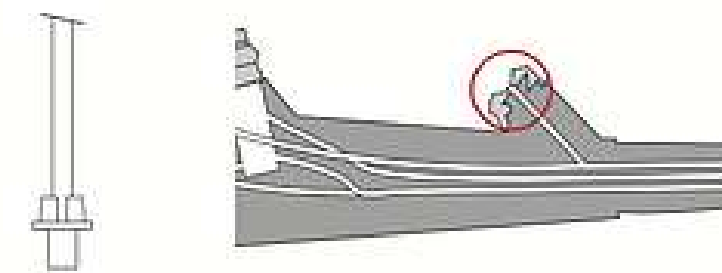

Connectez le port 4 à la partie 4 de l'endoscope

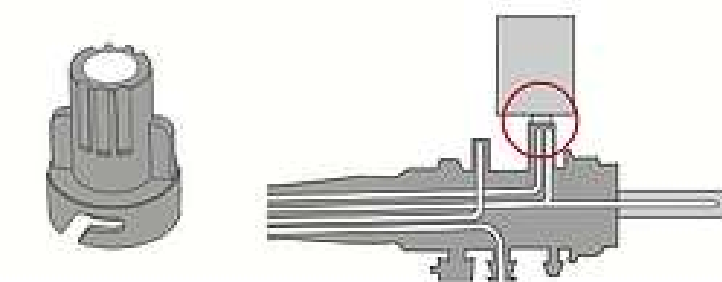

Connectez le port 5 à la partie 5 de l'endoscope

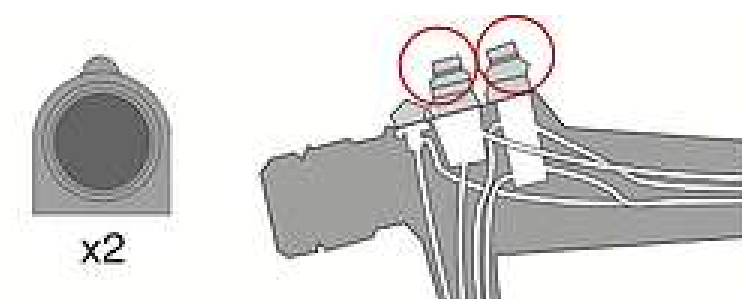


Connectez le port 6 à la partie 6 de l'endoscope




Canal opérateur ou canal de biopsie



Canal d'aspiration.
Toujours en forme de sapin

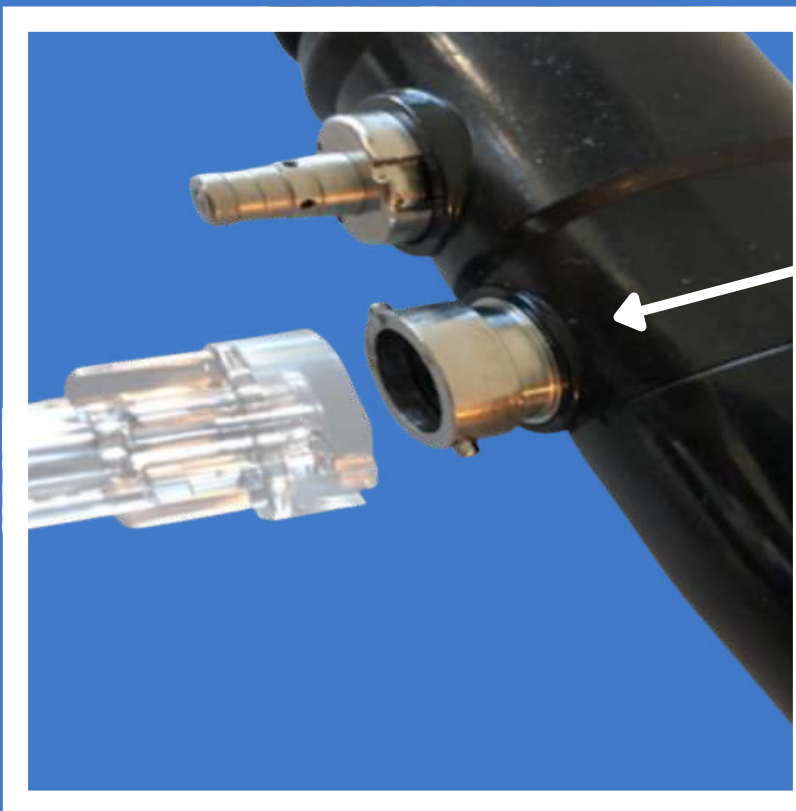

Canal air/eau
Raccord spécial, difficile à boucher (étanche) sans le bon raccord

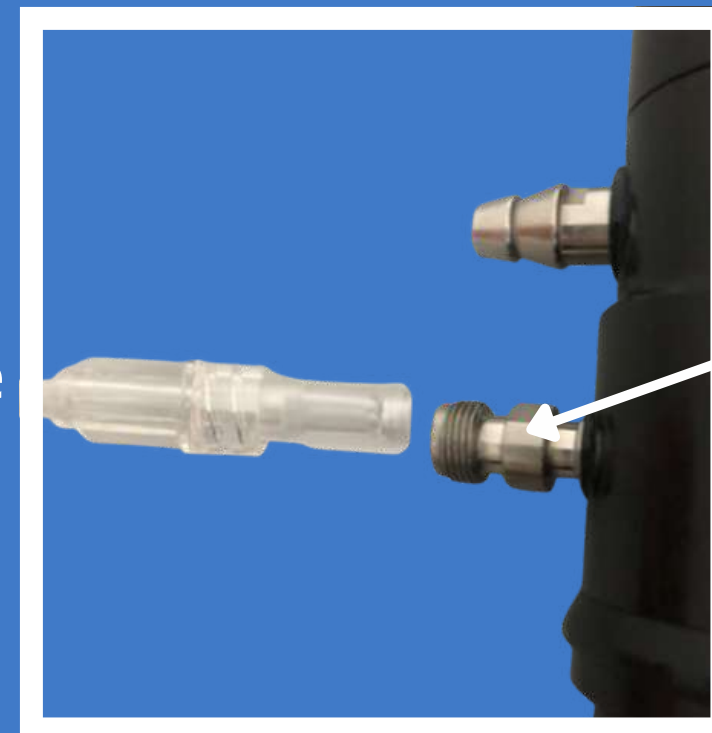

Canal Aquajet
(jet d'eau)
Spécifique selon les marques